


義歯床の正確なチェックをお手軽に！

MIZZY


PRESSURE INDICATOR PASTE

ミジィ・プレッシャー・インジケーター・ペースト


PIPはフルデンチャー、パーシャルデンチャー、インレー、クラウンなどの異常位を手軽で精密にチェックでき、その部位を正確に確認できます。

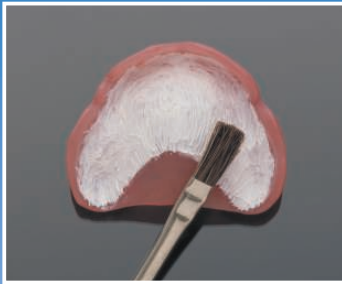


1 PIPペーストを筆で床全面に塗布する。

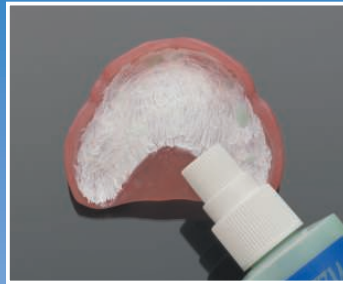

2 PIPスプレーを塗布面に吹き付ける。

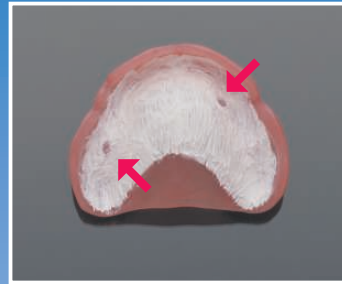

3 装着チェック後、異常位の確認。ペーストの剥けた部分を削除、調整。

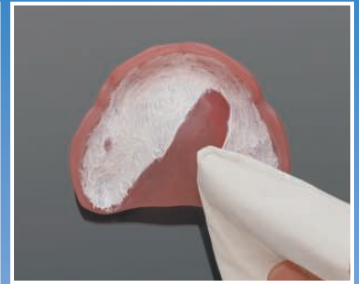

4 PIPリムーバーを浸み込ませたティッシュか布でペーストを拭き取る。

詳しい使用方法は、このカタログの裏面をご覧ください。



No.MP-1 < PIPトライアルパッケージ >

- ペースト(36g)
- リムーバー(30cc)
- プラスチックスプーン (5本)
- スプレー (30cc)
- 筆(軟・硬 各1本)
- 練和紙(1冊)

一般医療機器
医療機器届出番号: 27B3X00137 000001



No.MP-2 < PIPエコパッケージ >

- ペースト(64g)
- スプレー (30cc)
- リムーバー(30cc)
- 筆(軟・硬 各2本)
- プラスチックスプーン (5本)
- 練和紙(1冊)

一般医療機器
医療機器届出番号: 27B3X00137 000001



No.MP-3 < PIPポンプ >

- ペースト(111.3g)
- プラスチックスプーン (5本)
- 筆(軟・硬 各3本)
- 練和紙(1冊)

一般医療機器
医療機器届出番号: 27B3X00137 000001



No.MP-4 < PIPセット >

- ペースト(36g)
- スプレー (120cc)
- リムーバー(120cc)
- 筆(軟・硬 各2本)
- プラスチックスプーン (5本)
- 練和紙(1冊)

一般医療機器
医療機器届出番号: 27B3X00137 000001



No.MPR-1

- リムーバー (120cc)

No.MPS-1

- スプレー (120cc)

総輸入元

株式会社 プロデント

〒535-0021 大阪市旭区清水4-13-6
TEL(06)6957-1000 FAX(06)6957-1050
Eメール: prodent @ mti. biglobe. ne. jp

MIZZY PRESSURE INDICATOR PASTE

ミジィPIP 使用説明書

PIPペーストの特長

1. プレッシャーインジケーターペースト（PIP）は、義歯床の位置、大きさ、形状、厚み、その他の適合の異常にもとずく疼痛や不快な違和感の除去および異常位の改善に用います。
また薄く伸ばすことができるので正確なチェックができます。
2. 使用前に加湿軟化させたり、口腔内で軟化を待つ必要もなく必要時にはすぐ使用できます。

使用方法

1. 義歯床の表面を乾燥させてください。PIPは乾燥面にしか付きません。
2. ペーストは硬化しませんので、ゆっくり筆のラインがつくように塗布するとより効果的です。
3. PIPを塗布した義歯床に、PIPスプレーを吹付けてください。
4. デンチャーを口腔内に装着し、口を閉じさせて軽く押えてください。
5. 圧痛が軽度の患者は異常域の記録に時間がかかるので、床をしばらく装着させておくか少し力を加えてください。
6. 床をはずしてペーストの剥げた部分を削除してください。
7. PIPは研磨が終るまでつけたままにしておいてください。
8. 圧痛または違和感がなくなるまで上記方法を教回くり返してください。
9. 義歯床に残ったPIPは、PIPリムーバーで取り除いてください。

使用中の義歯床の圧痛

1. 使用中の義歯床は患者に圧痛点か上顎、下顎、左右、前後のいずれにあるか予診をして、おおよその位置を確かめてください。
2. PIPをそのまま指適域のある片側全面に（床の1/2ほど）薄く塗布してください。
3. 床を口腔内に装着し、患者に口の開閉、顔面運動、その他何か圧痛の起こる口腔運動をさせてください。
4. 注意深く床を取りはずし、ペーストのはげた部分を削除してください。

◆新しい義歯床を患者に装着する場合、PIPで圧痛の有無を調べてください。この点検をしておくことで将来の調整が要りません。
この場合、先ず床の基底部分を点検し、次いで床辺縁を調べます。このような一定の手順を定めて新しい義歯床を点検して患者に装着しますと、将来の圧痛が予防できます。

局部床義歯

局部床義歯の鋳造体の不適合は通常、クラスプや連結部の内側、特にその長軸的内側に問題があり、これを口腔に試適してPIP検査を行うと、ほとんど改良できます。

清浄法

PIPリムーバーを浸み込ませたティッシュペーパーか布でペーストを拭き取ってください。容易に除去できます。
万一、深い裂溝などに拭き取れない残滓が残る場合は超音波洗浄器を使用してください。

◆PIPリムーバーは、その他、インスツルメントに付着した酸化亜鉛ユージノールセメントや非ユージノール系セメントなど、仮着剤や合着剤の除去にも適しています。

PIPスプレー（シリコン乳液）の用途

1. PIPの塗布された義歯床表面にPIPスプレーを十分に噴霧してください。薄く伸ばされたPIP表面にスプレーの膜ができ、患者さんの口腔内粘膜面にPIPが付着するのを防いでくれます。
2. インスツルメントにPIPスプレーを吹き付けると汚れの付着を防止し、またミラーのくもり止めなどにも利用できます。




ご注意


- ◆PIPペースト・スプレー・リムーバーは直射日光の当たらない場所に常温で保存してください。
- ◆PIPペースト・スプレー・リムーバーが目や鼻に入ったときは速やかに水で洗い流してください。



●デュラシンディスク 一般医療機器
医療機器届出番号：27B3X00137 000103

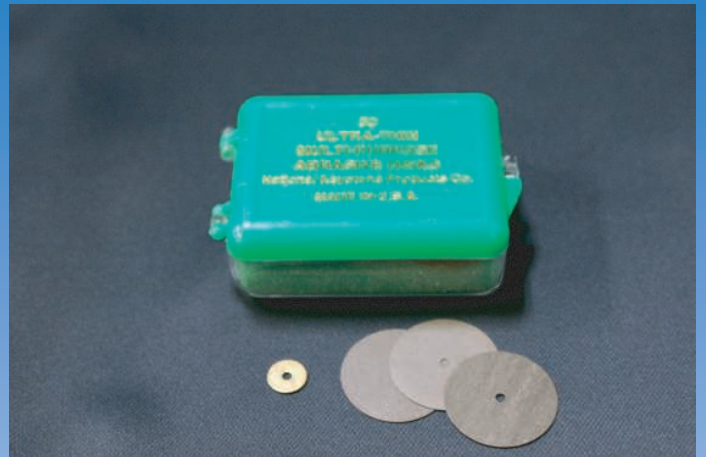

●ウルトラシンディスク 一般医療機器
医療機器届出番号：27B3X00137 000106

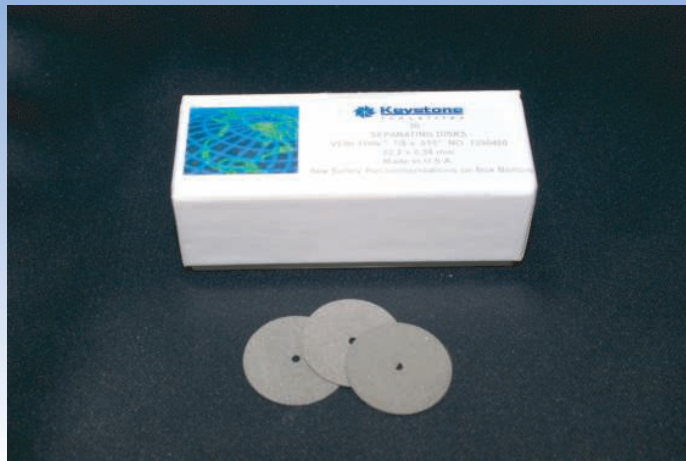

●ベリシンディスク 一般医療機器
医療機器届出番号：27B3X00137 000101



●ミジュー ホワイト ヒートレス ホイール
一般医療機器
医療機器届出番号：27B3X00137 000105

●ミジュー ヒートレス ホイール
一般医療機器
医療機器届出番号：27B3X00137 000104

総輸入元

株式会社 プロデント

〒535-0021 大阪市旭区清水4-13-6
TEL(06)6957-1000 FAX(06)6957-1050
Eメール: prodent @ mti. biglobe. ne. jp